


Für den Nachweis von Gruppe-B-Streptococcus (GBS)-DNA in vaginalen/rektalen Abstrichen. Zur Verwendung mit dem Revogene-Gerät. Informationen zu ordnungsgemäßen externen Kontrollprüfungen und zur Auswertung der Ergebnisse entnehmen Sie bitte den aktuellen vollständigen Anweisungen.


TESTVERFAHREN Kurzanleitung

1.

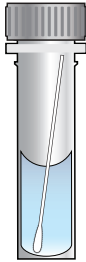


- Brechen Sie den vaginalen/rektalen Abstrichtupfer im Probenpufferröhrchen (SBT) ab.
- Mischen Sie das SBT mit hoher Geschwindigkeit 30 Sekunden lang mit dem Vortexmischer.
- Öffnen Sie den Beutel mit der PIE Revogene® GBS DS.

2.

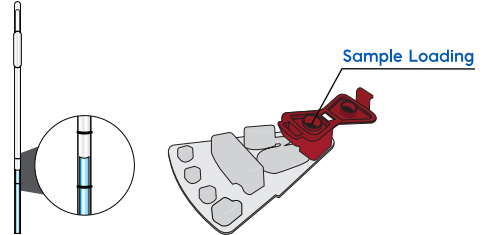

- Aspirieren Sie mit dem Einweg-Übertragungswerkzeug (DTT) den inokulierten Probenpuffer (SB), indem Sie den gesamten Ballon so weit zusammendrücken, bis der Flüssigkeitsstand zwischen den beiden Linien auf dem DTT liegt.
- Geben Sie die gesamte Probe in die Kammer zur Probenladung der PIE.
- Schließen Sie die Kappe der Kammer zur Probenladung fest.

3.

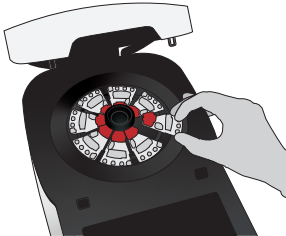

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Patiententest-PIE zu laden.
- Laden Sie die verbleibenden Patiententests. Sollten weniger als acht (8) PIEs getestet werden, laden Sie MOCK PIEs in die verbleibenden Positionen der Zentrifuge.
- Scannen Sie den Haltering und legen Sie ihn auf die Zentrifuge.

4.



- Schließen Sie den Deckel des Geräts mit beiden Händen und achten Sie darauf, dass der Deckelverschluss einrastet.
- Wählen Sie „Start“, um den Test zu initiieren und entfernen Sie sich.
- Der Deckel öffnet sich, sobald der Lauf beendet ist.
- Entfernen Sie nach dem Lauf alle PIEs, einschließlich MOCK PIEs.
- Tippen Sie auf das Symbol „Ergebnisse“, um auf die Testergebnisse zuzugreifen.

Hinweis: Die E-PRO-Funktion kann nach frühestens 40 Minuten positive Ergebnisse anzeigen.



Diese Abbildung ist repräsentativ für die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuelle und vollständige Gebrauchsanweisung. Vollständige Angaben entnehmen Sie bitte der aktuellen Version des Assay und der Anweisungen zum Instrument. www.meridianbioscience.com/pi

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244, USA
Telephone: 513-271-3700

EMEA, MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Phone: +39 0331433636
E-mail: MBE-TechService@meridianbioscience.eu

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com