

PROCEDURE DE TEST

Comment procéder


1a. Selles liquides:

immerger complètement la brosse dans l'échantillon.



1b. Selles semi-solides:

Prélever approximativement la valeur d'une demi-brosse de selles par légère pression sur la selle bien mélangée.

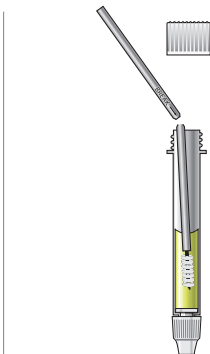

2. Insérer la brosse dans le Système de Préparation de l'Echantillon. Casser la brosse au niveau de la marque sur le manche. Fermer à l'aide du capuchon et passer au vortex 10 secondes.




3. Retirer le capuchon de l'embout et presser pour dispenser cinq à dix gouttes d'échantillon dans un tube de traitement thermique.




4. Chauffer le tube de traitement thermique dans un bloc chauffant à 95 C pendant 10 minutes. Passer ensuite au vortex au moins 10 secondes.



5. Transférer 50 µL de l'échantillon traité dans le tube de tampon de réaction. Passer au vortex pendant 10 secondes.

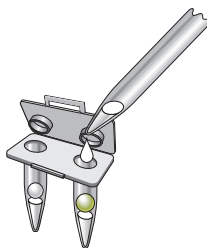

6. A l'aide d'une micropipette, transférer 50 µL du tube de tampon de réaction dans la chambre de test (gauche), puis 50 µL vers la chambre de contrôle (droite) du dispositif de test Alethia™.

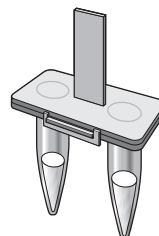

7. Fermer le dispositif et bien engager le loquet de verrouillage. Tapoter le dispositif sur la paillasse pour éliminer les bulles d'air. Examiner avec attention les tubes de réaction afin de s'assurer qu'il ne reste aucune bulle d'air dans le tube.



8. Insérer le dispositif de test Alethia™ dans instrument Alethia™ et commencer la réaction d'amplification et de détection.



Cette procédure résumée est représentative de la notice au moment de sa publication. Pour des instructions complètes, se référer à la notice la plus récente.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com

meridian BIOSCIENCE™