

alethia™

Group B Streptococcus

PROCEDURE DE TEST

Comment procéder

1. Prélèvement:

le prélèvement d'échantillon vaginal et rectal doit être effectué conformément aux directives publiées pour le prélèvement de spécimens cliniques de *streptocoque* du groupe B.

2. Enrichissement:

Sortir le frottis du dispositif de transport et le placer dans du bouillon de culture.



3. Incuber les échantillons dans le bouillon de culture à 35-37 C pendant 18 à 24 heures.

4. Ajouter 200 µL de réactif de contrôle Alethia™ au tube de traitement thermique.



5. Bien mélanger le bouillon de culture enrichi. Ajouter 50 µL de bouillon enrichi au tube de traitement thermique.




6. Chauffer le tube de traitement thermique Alethia™ dans un bloc chauffant à 95 C pendant 10 minutes. Passer ensuite au vortex au moins 10 secondes.




7. Transférer 50 µL d'échantillon traité thermiquement dans un tube de tampon de réaction. Passer au vortex 10 secondes.



8. À l'aide d'une micropipette, transférer 50 µL d'échantillon traité thermiquement du tube tampon de réaction dans la chambre de TEST (gauche), puis 50 µL dans la chambre de CONTRÔLE (droite) du dispositif de test Alethia™.

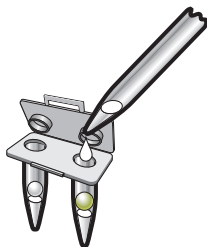

9. Fermer le dispositif et rabattre le loquet de verrouillage. Tapoter le dispositif sur la paillasse pour éliminer les bulles d'air. Examiner avec attention les tube de réaction afin de s'assurer qu'il ne reste aucune bulle d'air dans le tube.

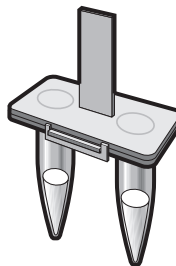

10. Insérez le dispositif de test Alethia™ dans l'instrument Alethia™ et lancez la réaction d'amplification et la détection.



Cette procédure résumée est représentative de la notice au moment de sa publication. Pour des instructions complètes, se référer à la notice la plus récente.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0) 6789 5959
France Tel: +33 (0) 1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0) 3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0) 411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0) 20 8453 7970

Orders/ Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com

meridian BIOSCIENCE™