


alethia™

HSV 1&2


PROCEDURE DE TEST

Comment effectuer le test

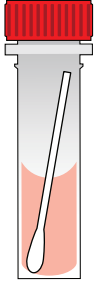


1. Préparation des échantillons:


Passer au vortex l'écouvillonnage dans le milieu de transport pendant 45 à 60 secondes.

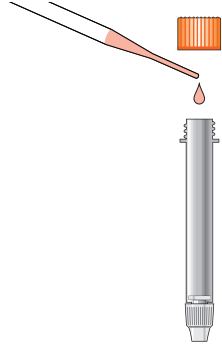


2. À l'aide d'une pipette de transfert, transférer 50 µL du milieu de l'écouvillon dans le dispositif SMP PREP III Alethia™. Jeter la pipette de transfert. Fermer le SMP PREP III et le passer au vortex pendant 10 secondes.

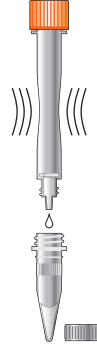

3. Enlever le bouchon de l'embout de SMP PREP III et presser pour transférer tout le contenu du SMP PREP III dans un tube de traitement thermique.

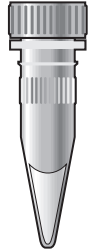

4. Chauffer l'échantillon à 95 C pendant 10 minutes. Passer au vortex pendant 10 secondes.

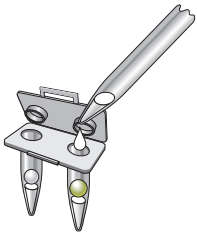


5. A l'aide d'une pipette, transférer 50 µL de chaque échantillon vers le puits TEST (gauche) et le puits CONTRÔLE (droite) du dispositif de test Alethia™ HSV1 et du dispositif de test Alethia™ HSV2.




6. Ajouter 1 goutte d'huile minérale dans le puits TEST et une autre dans le puits CONTRÔLE des deux dispositifs de test.

Dispositif de test Alethia™ HSV 1

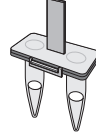

Dispositif de test Alethia™ HSV 2

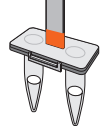

7. Fermer le dispositif et rabattre le loquet. Tapoter doucement le dispositif pour éliminer les bulles d'air piégées au fond des tubes. Examiner soigneusement les tubes de réaction pour s'assurer qu'il n'y reste pas de bulles d'air. Répéter les étapes 5 à 7 pour tous les échantillons à tester.



8. Insérer le dispositif de test Alethia™ dans l'instrument Alethia™ et initier la réaction d'amplification et la détection.

 Cette procédure résumée est représentative de la notice au moment de sa publication. Pour des instructions complètes, se référer à la notice la plus récente.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com

meridian BIOSCIENCE™