

PROCÉDURE DE TEST

Comment effectuer le test




1. Prélèvement des échantillons:

le prélèvement des échantillons nasopharyngés doit être effectué selon les procédures de l'établissement concernant le recueil des spécimens cliniques en cas d'infection par *Bordetella pertussis*.




2. Placer l'écouvillon dans un tube de tampon pour échantillon. Couper la tige de l'écouvillon pour permettre à l'échantillon de tenir dans le tube, boucher le tube et passer au vortex pendant 45 secondes.

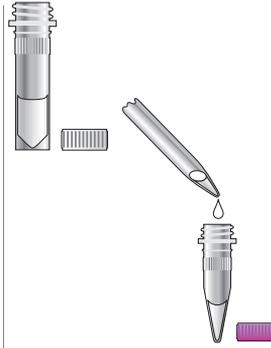

3. Ajouter 50 µL d'échantillon élué dans un tube de Contrôle de dosage. Passer au vortex pendant 10 secondes.




4. Chauffer le mélange échantillon/contrôle dans un bloc chauffant à 95 C pendant 10 minutes. Passer au vortex pendant 10 secondes.

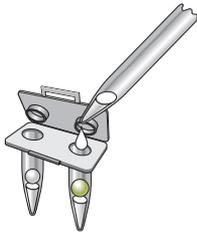

5. À l'aide d'une micropipette, transférer 50 µL d'échantillon traité thermiquement dans le puits TEST (gauche), puis transférer 50 µL d'échantillon traité thermiquement dans le puits CONTRÔLE (droite) du dispositif de test Alethia™.



6. Ajouter 1 goutte d'huile minérale dans le puits TEST et le puits CONTRÔLE.

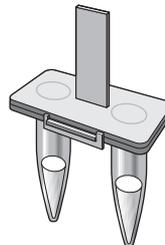

7. Fermer le dispositif et rabattre correctement le loquet. Tapoter le dispositif sur la paillasse pour éliminer les bulles d'air. Vérifier l'absence de bulles d'air dans les puits du dispositif.



8. Insérer le dispositif de test Alethia™ dans l'instrument Altheia™ et initier la réaction d'amplification et la détection.

 Cette procédure résumée est représentative de la notice au moment de sa publication. Pour des instructions complètes, se référer à la notice la plus récente.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/ Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com

PROCÉDURE DE TEST

Comment effectuer le test




1. Mélanger au vortex le tube Eswab contenant l'écouvillonnage pendant 10 secondes au moins pour éluer l'échantillon.



2. Transférer 25 µL du milieu dans un tube de Contrôle de dosage.




3. Chauffer le mélange échantillon/contrôle dans un bloc chauffant à 95 C pendant 10 minutes. Passer au vortex pendant 10 secondes.

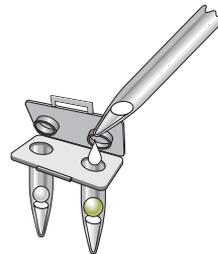

4. À l'aide d'une micropipette, transférer 50 µL d'échantillon traité thermiquement dans le puits TEST (gauche), puis transférer 50 µL d'échantillon traité thermiquement dans le puits CONTRÔLE (droite) du dispositif de test Alethia™.



5. Ajouter 1 goutte d'huile minérale dans le puits TEST et le puits CONTRÔLE.

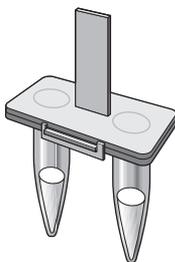

6. Fermer le dispositif et rabattre correctement le loquet. Tapoter le dispositif sur la paillasse pour éliminer les bulles d'air. Vérifier l'absence de bulles d'air dans les puits du dispositif.



7. Insérer le dispositif de test Alethia™ dans l'Instrument Alethia™ et initier la réaction d'amplification et la détection.

 Cette procédure résumée est représentative de la notice au moment de sa publication. Pour des instructions complètes, se référer à la notice la plus récente.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com