

PROCÉDURE DE TEST

Comment effectuer le test



1. Prélèvement des échantillons:

Prélever des échantillons nasopharyngés conformément aux procédures institutionnelles en matière de collecte d'échantillons cliniques pour les infections à *Bordetella pertussis*.



2. Ajouter 50 µL de réactif de prétraitement reconstitué au tube tampon pour l'échantillon étiqueté.



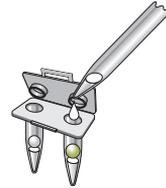
3. Insérer l'écouvillon dans le tube de tampon pour échantillon. Briser la tige de l'écouvillon, reboucher le tube et mélanger au vortex pendant 45 secondes.



4. Transférer 50 µL du mélange dans le tube de contrôle de dosage. Mélanger au vortex pendant 10 secondes.



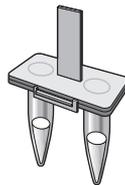
5. Chauffer le tube de contrôle de dosage à 95 C pendant 10 minutes. Mélanger au vortex pendant 10 secondes.



6. À l'aide d'une micropipette, transférer 50 µL d'échantillon traité thermiquement dans le puits TEST (gauche), puis transférer 50 µL d'échantillon traité thermiquement dans le puits CONTRÔLE (droite) du dispositif de test Alethia™.



7. Ajouter 1 goutte d'huile minérale dans les puits TEST de CONTRÔLE.



8. Fermer le dispositif et rabattre le loquet. Tapoter doucement le dispositif pour éliminer les bulles d'air piégées au fond des tubes. Examiner soigneusement les tubes de réaction pour s'assurer qu'il ne reste pas de bulles d'air.



9. Insérer le dispositif de test Alethia™ dans l'Instrument Alethia™ et initier la réaction d'amplification et la détection.

 Cette procédure résumée est représentative de la notice au moment de sa publication. Pour des instructions complètes, se référer à la notice la plus récente.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

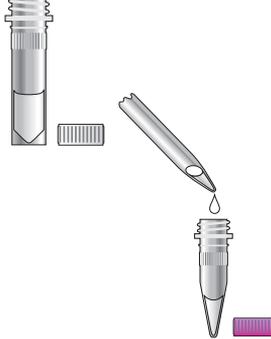
Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com

PROCÉDURE DE TEST

Comment effectuer le test

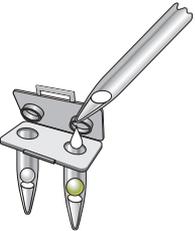
- 

1. Ajouter 50 µL de réactif de prétraitement reconstitué au tube du tampon pour l'échantillon contenant l'échantillon du patient.
- 

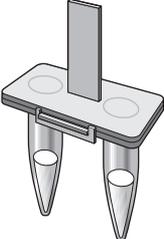
2. Reboucher le tube et mélanger au vortex pendant 10 à 15 secondes.
- 

3. Transférer 50 µL du mélange dans le tube de contrôle de dosage. Mélanger au vortex pendant 10 secondes.
- 

4. Chauffer le tube de contrôle de dosage à 95 C pendant 10 minutes. Mélanger au vortex pendant 10 secondes.

- 

5. À l'aide d'une micropipette, transférer 50 µL d'échantillon traité thermiquement dans le puits TEST (gauche), puis transférer 50 µL d'échantillon traité thermiquement dans le puits CONTRÔLE (droite) du dispositif de test Alethia™.
- 

6. Ajouter 1 goutte d'huile minérale dans les puits TEST de CONTRÔLE.
- 

7. Fermer le dispositif et rabattre le loquet. Tapoter doucement le dispositif pour éliminer les bulles d'air piégées au fond des tubes. Examiner soigneusement les tubes de réaction pour s'assurer qu'il ne reste pas de bulles d'air.
- 

8. Insérer le dispositif de test Alethia™ dans l'Instrument Alethia™ et initier la réaction d'amplification et la détection.



Cette procédure résumée est représentative de la notice au moment de sa publication. Pour des instructions complètes, se référer à la notice la plus récente.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com