

1. Istruire il paziente a **trattenere il respiro per 4–5 secondi** e poi **espirare in modo continuo e deciso** nella sacca blu per il campione di respiro **BASALE**.

2. Chiudere il tappo premendo fino a sentire un **clic**.



3. Riempire mezzo bicchiere di acqua a temperatura ambiente. Preparare la bevanda del test **sciogliendo l'acido citrico fornito e la compressa di urea arricchita con ¹³C**.



4. Mescolare la bevanda con la cannuccia fino a quando la soluzione è completamente **disciolta**.

5. Istruire il paziente a **bere** l'intera soluzione utilizzando la cannuccia **entro 2 minuti**.

6. Attendere **30 minuti**.

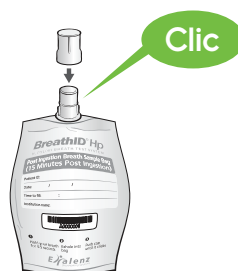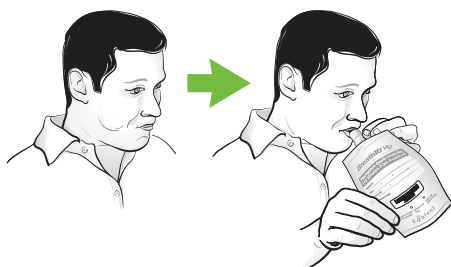

7. Istruire il paziente a **trattenere il respiro per 4–5 secondi** e poi **espirare in modo continuo e deciso** nella sacca grigia per il campione di respiro **POST-INGESTIONE**.

8. Chiudere il tappo premendo fino a sentire un **clic**.

9. Assicurarsi che **entrambe** le sacche per il campione di respiro rimangano insieme come una coppia e inviarle per l'analisi.

Per informazioni dettagliate sulla procedura passo dopo passo, consultare le Istruzioni per l'Uso di IDkit Hp®.

breathID®



Scansiona per guardare il video

meridian BIOSCIENCE®