

TEST DI SISTEMA/CONTROLLO DELLA CALIBRAZIONE


Sacche per Campioni di Respiro come Fonte di Gas

**breathID®
smart**

H. pylori

1. Il sistema BreathID® Smart può determinare la necessità di eseguire un **Test di sistema** o un **Controllo della calibrazione**. È inoltre possibile avviare manualmente uno dei due processi dalla schermata Menu.


Quando il processo viene avviato dal sistema, verrà visualizzato uno dei seguenti messaggi:

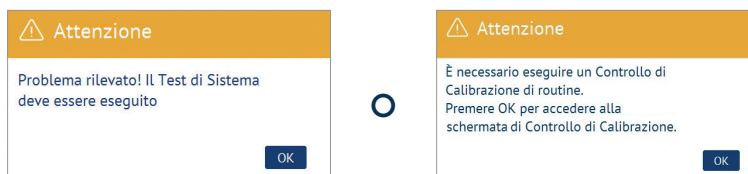

- Premere **OK**.

Nota: sia il Test di sistema sia il Controllo della calibrazione utilizzano sacche per campioni di respiro riempite con il respiro dell'operatore e le fasi operative sono le stesse per entrambi i processi.

2.

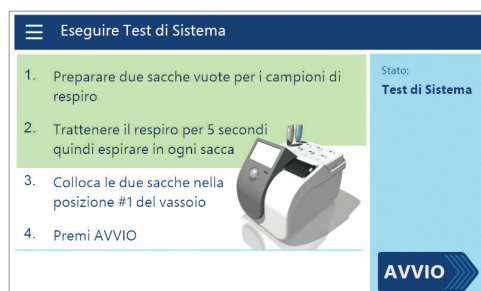

- Preparare due Sacche per Campioni di Respiro vuote.
- Riempire entrambe le sacche come segue:



Fare un respiro profondo e trattenere il respiro per 5 secondi



Espirare in modo continuo e deciso nella sacca. La sacca deve essere completamente gonfia e risultare rigida al tatto



Se la sacca non è piena, fare un altro respiro profondo e trattenere il respiro per 5 secondi



Soffiare nuovamente in modo continuo e deciso nella sacca

- Ripetere le operazioni per la seconda sacca.

Nota: per informazioni più dettagliate su come riempire le sacche, scansionare questo codice per guardare il video.



Leggere il Capitolo 6 del Manuale dell'Operatore

PRODUTTORE:

Meridian Bioscience Israel Ltd.
4 Ha'Maayan St.
Modiin, Israele 7177872
Tel.: +972-8-973-7500

EMEA, MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE:

Tel.: +39-0331-433636
Email:
MBE-TechService@meridianbioscience.eu

PER RICHIESTE DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVE AL SISTEMA BREATHID® SMART, CONTATTARE:

USA: 888-392-5369 | modiin.support-USA@meridianbioscience.com
Europa: +39-0331-433636 | MBE-TechService@meridianbioscience.eu
Internazionale: +972-8-973-7500 | modiin.support@meridianbioscience.com
Per assistenza ordini:
ordini@meridianbioscience.com

meridian BIOSCIENCE®

TEST DI SISTEMA/CONTROLLO DELLA CALIBRAZIONE

Sacche per Campioni di Respiro come Fonte di Gas

breathID[®]
smart

H. pylori

3.




- Sul pannello superiore del dispositivo, inserire entrambe le sacche nelle due porte della posizione n. 1.

Nota: se i LED corrispondenti sono accesi in verde, le sacche sono inserite correttamente.

- Premere **AVVIO**.



4.

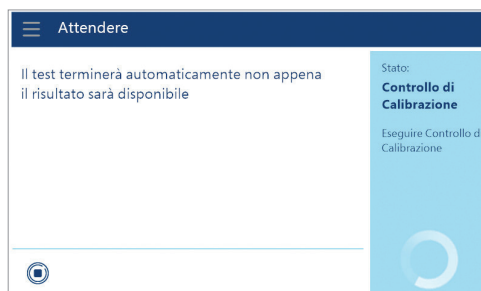

- Attendere la fine del processo.

Nota: dopo aver premuto **AVVIO**, lo stato corrente visualizzato sullo schermo mostrerà quale tipo di processo è in esecuzione.

5.

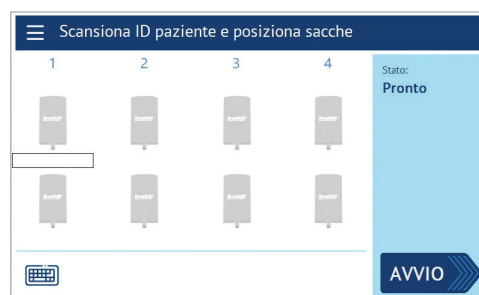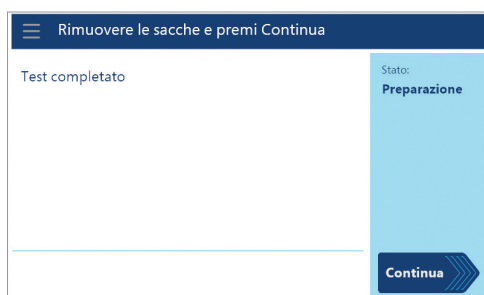

- Al termine del processo, rimuovere entrambe le sacche dal dispositivo.
- Premere **Continua** e lo stato del dispositivo passerà a **Pronto**.



Leggere il Capitolo 6 del Manuale dell'Operatore

PRODUTTORE:

Meridian Bioscience Israel Ltd.
4 Ha'Maayan St.
Modiin, Israele 7177872
Tel.: +972-8-973-7500

EMEA, MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE:

Tel.: +39-0331-433636
Email:
MBE-TechService@meridianbioscience.eu

PER RICHIESTE DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVE AL SISTEMA BREATHID[®] SMART, CONTATTARE:

USA: 888-392-5369 | modiin.support-USA@meridianbioscience.com
Europa: +39-0331-433636 | MBE-TechService@meridianbioscience.eu
Internazionale: +972-8-973-7500 | modiin.support@meridianbioscience.com
Per assistenza ordini:
ordini@meridianbioscience.com